

OZONIZADOR DE AMBIENTES

OZONIC “MINI”

(COMO USAR)

O EQUIPAMENTO GERADOR DE OZÔNIO DA MARCA **OZONIC**, TEM A FINALIDADE DE ELIMINAR BACTÉRIAS E FUNGOS PRESENTES NOS AMBIENTES, EM ESPECIAL NOS AMBULATÓRIOS E SALAS DE CIRURGIA, PELA AÇÃO DO OZÔNIO, QUE É O MAIS FORTE AGENTE OXIDANTE CONHECIDO. PRODUZ OZÔNIO A PARTIR DO OXIGÊNIO EM CILINDROS OU PROVENIENTE DE UMA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL. TRANSFORMA PARTE DESTES O₂ EM O₃. OZÔNIO É UMA FORMA ALOTRÓPICA DO OXIGÊNIO. O “FDA” – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION – CLASSIFICA O OZÔNIO COM O GRAU “GRAS” – (GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE), OU SEJA: GERICAMENTE RECONHECIDO COMO SEGURO. ADICIONALMENTE TEM EFEITO LETAL EM INSETOS E ÁCAROS.

MODO DE USO:

1. LIGUE O PLUG EM UMA TOMADA ENERGIZADA COM 110 OU 220 VOLTS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DA PORTA DE ENTRADA.
2. OBSERVE NO PAINEL – VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO - DO MESMO A INDICAÇÃO “PRESS START”. APERTE O BOTÃO CORRESPONDENTE.
3. A SEGUIR, NESSA TELA “LCD”, APARECERÁ O VALOR DE MICROGRAMAS PARA O QUAL ESTÁ PROGRAMADO. VARIA DE 01 A 90 MICROGRAMAS PARA TER SEU AJUSTE FEITO EM FUNÇÃO DA ÁREA DA SALA OU GABINETE A SER SANITIZADO. APERTE A TELA “CONFIRM”.
4. SURTIRÁ ENTÃO, OUTRA INFORMAÇÃO NA TELA “LCD”, INDICANDO QUAL SERÁ A REGULAGEM DE FLUXO DE OXIGÊNIO A SER PROGRAMADA.
5. PROGRAME NO REGULADOR DE OXIGÊNIO ESTE VALOR.
6. DEIXE O GERADOR DE OZÔNIO OPERANDO PELO TEMPO NECESSÁRIO PARA COMPLETA ASSEPSIA DA SALA OU AMBIENTE, DENTRO DOS SEGUINTE PARÂMETROS:
7. 4 M² = 15 MINUTOS NA REGULADGEM 40. 8 M² = 20 MINUTOS. 16 M² = 25 MINUTOS. 32 M² = 30 MINUTOS. 32 M² = 35 MINUTOS. 64 M² = 40 MINUTOS.
8. NESSE AMBIENTE MANTENHA AS GAVETAS E ARMÁRIOS ABERTOS, JANELAS E PORTAS FECHADAS. INSETOS E ÁCAROS SERÃO ELIMINDADOS POR AÇÃO LETAL.
9. APÓS ESTE TEMPO ACIMA CITADO, ABRA A PORTA DA SALA, AGUARDE DEZ MINUTOS, DESLIGUE EM SEGUIDA O GERADOR QUE

ESTARÁ PRÓXIMO À PORTA E ABRA AS JANELAS. CINCO MINUTOS É O TEMPO QUE ISTO DEMORA.

- 10. DESLIGUE O GERADOR E GUARDE-O EM SUA BOLSA DE TRANSPORTE, LEVANDO-O PARA OUTRAS SALAS EM QUE DEVA SER FEITA A ASSEPSIA. FECHER A VÁLVULA DO CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FORNECEDOR DO GÁS.**

Cuidados:

- **No caso de irritação das mucosas (olhos, nariz ou garganta), tomar um comprimido de vitamina “C”, que é um anti oxidante.**
- **Neste caso, não permanecer na sala até o odor característico deixar de existir.**
- **Fechar a válvula do suprimento de oxigênio, seguindo as instruções do fornecedor desse gás (White Martins, AGA, etc.) Telefone da White Martins é 0800-709-9000. Eles fornecem uma ficha técnica de como usar o produto oxigênio em cilindros.**

Manutenção:

Contate a OZONIC Pelo e-mail info@ozonio.net

Literatura disponível:

Caso tenham interesse, questionem sobre a literatura disponível.

**OZONIC
(11) 4330-5033 (H/C)
São Bernardo do Campo - SP**