

MANUAL DO EQUIPAMENTO OZONIC MODELO “AA”



VEJA A SEGUIR OS DETALHES DO PAINEL FRONTAL E COMANDOS

Para operar este equipamento o usuário deve estar habilitado e com curso de ozonioterapia

Não é equipamento para ser operado por leigos

COMO OPERAR:

- 1 – Retire-o da bolsa de transporte.
- 2 – Coloque-o sobre um móvel com aproximadamente um metro de altura.
- 3 – Ligue o plugue de força a uma tomada elétrica energizada com 110 ou 220V CA 60 Hz.
- 4 – Ligue a chave liga / desliga (I/O) que está no painel do mesmo. Ver desenho abaixo.
- 5 – Coloque o botão de ajuste da potência, no número “9”.
- 6 – Verifique se o gerador emite um leve ruído agudo.
- 7 – Caso esteja emitindo, significa que o gerador está apto para produzir ozônio. Se não emitir, chame assistência técnica.
- 8 – Ligue a mangueira com anilha de cor verde ao regulador de oxigênio. Este por sua vez deverá estar conectado com a válvula do cilindro de oxigênio medicinal.
- 9 – Abra a válvula do cilindro de oxigênio, suavemente e no sentido anti-horário. O regulador de oxigênio que foi fornecido com o gerador

OZONIC, deverá estar na posição ZERO antes que seja aberta essa válvula.

10 – Consulte a TABELA de regulagem e escolha a dosagem que será utilizada no procedimento. Ela indicará duas regulagens: uma de 1 a 10, que servirá para regular o botão de ajuste da potência; a outra indicará qual será o fluxo de oxigênio que sairá no regulador (escala começa em 1/32, 1/16, ...)...... Este valor de dosagem é definido pelo profissional que irá prescrever o tratamento.

11 – Colete o gás com uma seringa na válvula de três vias, girando esta para a posição de fluxo de coleta. Rosqueie a seringa ali, até coletar o volume necessário (10, 20, ... ml)

12 – Desligue o botão (I/O), colocando-o na posição “O”.

13 – Encha a seringa quantas vezes forem necessárias, religando o botão (I/O).

Ao terminar o procedimento com este paciente, programe no sentido inverso, desligando tudo e fechando o regulador em ZERO e girando a válvula do cilindro totalmente no sentido horário.

Não fornecemos cilindros de oxigênio nem fazemos recarga do mesmo. Procure um fornecedor local, na sua cidade.


EM CASO DE DÚVIDAS, NÃO IMPROVISE!

CHAME O FABRICANTE OZONIC (11) 4330-5033. HORÁRIO COMERCIAL.

SE INALAR OZÔNIO, ou tiver as mucosas irritadas TOME DE IMEDIATO UMA PASTILHA DE VITAMINA “C” / ANTI OXIDANTE.

ESTE GERADOR NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA E NÃO PODE SER UTILIZADO COMO CORRELATO.

PAINEL FRONTAL DO GERADOR OZONIC

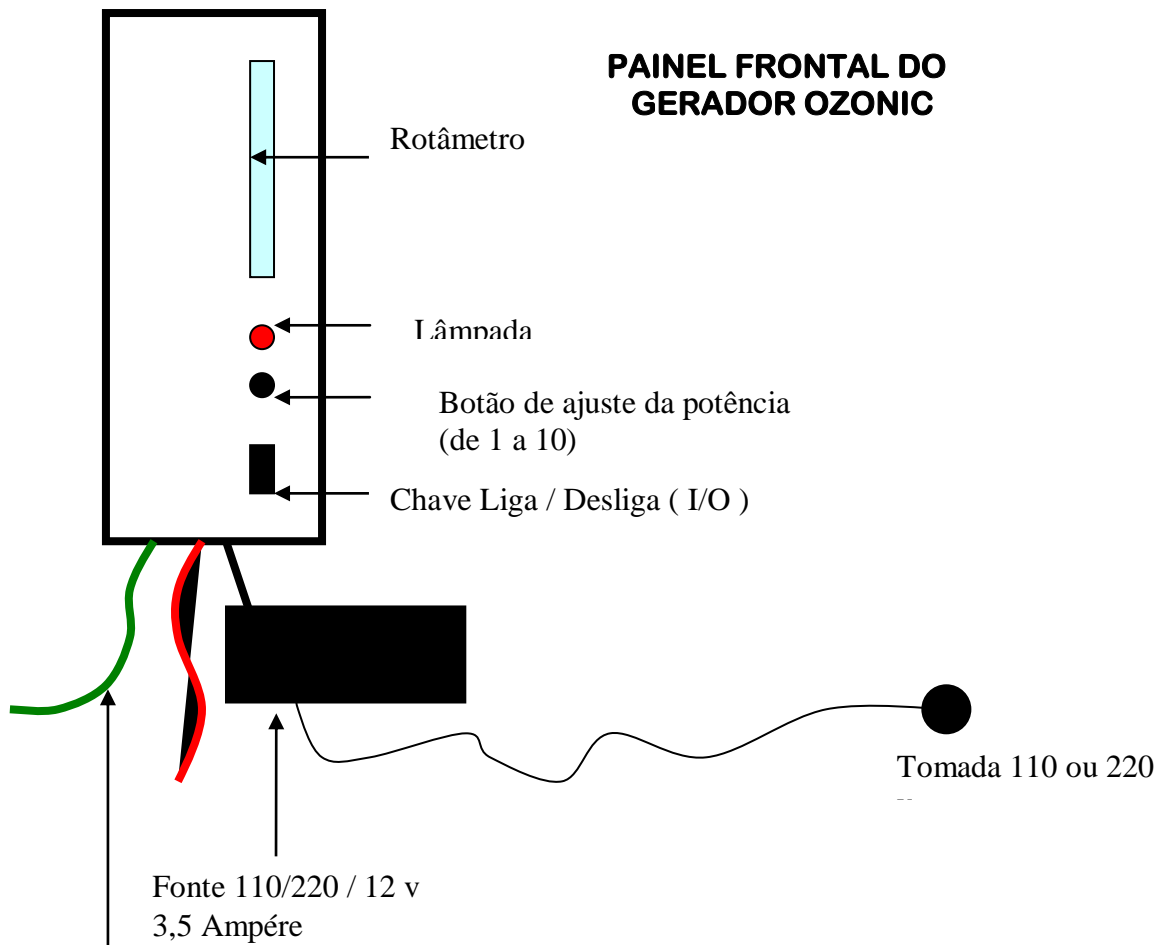

MANG. VERDE = ENTRADA DE O₂
MANG VERMELHA = SAIDA DE O₂ + O₃
Na ponta da mangueira vermelha tem uma válvula de 3 vias, em forma de "T". Ela pode ser posicionada em várias opções: totalmente fechada, aberta só para seringa, aberta para seringa e saída direta para uma mangueira de extensão.