

OZONIC®

MANUAL

DO

GERADOR

OZONIC

Modelo AB



MANUAL DO USUÁRIO – GERADOR DE OZÔNIO MARCA OZONIC – MODELO “AB”

(DE ACORDO COM OS ITENS 1 E 3 DO ANEXO III . B DA RDC 185/01 DE 22 DE OUTUBRO DE 2.001- ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

1 – Instalando o Gerador OZONIC:

a - Deve ser colocado sobre um móvel, de preferência com altura aproximada de um metro, para que possa ser operado e programado pelo usuário de modo ergonomicamente correto.



b – Deve a seguir ser conectado com o cabo de energia (1,5m) que o acompanha, ligando-o a uma tomada 110V ou 220V disponível, podendo ser uma destas tensões, pois ele a aceitará de modo automático.


c – Na seqüência, encaixar a mangueira de entrada de oxigênio para o gerador, identificada com anilha de cor verde, ao espigão de saída do regulador de oxigênio medicinal CGA **OZONIC** 540 Med, ou similar.

d – Este regulador por sua vez, está acoplado a um cilindro de oxigênio medicinal em condições normais de uso. Este cilindro não é fornecido pela OZONIC, devendo ser alugado ou adquirido em fornecedor local. A válvula da cabeça deste cilindro de oxigênio deverá neste ato, estar aberta (girar no sentido anti-horário).

e – Para saber se há gás nesse cilindro, o manômetro do regulador acima descrito deve acusar pressão que esteja fora da faixa vermelha. Se estiver nesta faixa, providenciar suprimento do oxigênio medicinal ao seu fornecedor preferido.

f - Cumpridas estas etapas, verifique a tela de cristal líquido do gerador OZONIC, aonde terá acesso a instruções digitais, ali registradas.

g – a primeira mensagem que surge nessa tela, é: “OZONIC Medic – Tecle start”
Ao ler pressione a tecla “start” do painel de comando.

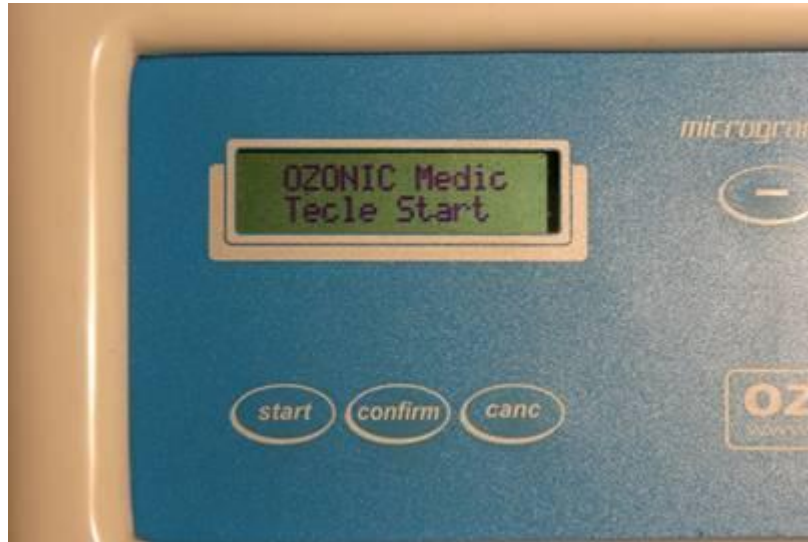

h – surgirá logo após, outra mensagem: “Ajuste Microgramas - μ Gramas atual” e depois de alguns segundos, esta mensagem será completada com um número (ex 40, 45,).: que indica estar o gerador OZONIC Medic programado para “n” microgramas.



i – se o seu protocolo exige um número diferente, maior ou menor, basta pressionar suavemente, ponto a ponto, um dos botões (+) ou (-) do painel de comando. Esse valor, irá mudando – um a um – até que chegue o número desejado.

j – aperte a seguir a tela “CONFIRM”.

k – surgirá então uma nova mensagem dizendo, “Ajuste oxigênio */* Press Conf”. Os dois asteriscos aqui citados, são na verdade os números de uma fração (ex.: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ...). Este valor deverá ser programado no regulador de oxigênio acima especificado.



l – isto feito, surge nessa tela de cristal líquido (LCD), a mensagem “Gerando – Pres Canc P /Parar”.



m – colete então a quantidade (cc ou mililitros), de gás O₂ + O₃ previstas em seu protocolo, colocando a ponteira da seringa na válvula de três vias (tri-way), que fica na extremidade da mangueira que sai do gerador e que tem a manilha de cor **vermelha**.

n – se não precisar de coletar mais oxigênio + ozônio, aperte a tecla “Cancel”, caso contrário mantendo-o ligado e gerando ozônio, dirija a válvula de três vias,

para que leve o gás ao destruidor de ozônio, sendo que esta mangueira possuem anilhas de cor amarela.

o - terminado o procedimento, apertada a tecla “cancel” feche a ZERO o regulador de oxigênio OZONIC, bem como a válvula da cabeça do cilindro de oxigênio medicinal.

p – ao fim da jornada, desconecte o gerador da tomada e guarde-o em sua bolsa de transporte.

2 – MENSAGENS DE NÃO CONFORMIDADE:

Mensagens de não conformidade podem surgir na tela LCD, entre elas:

- “ Equipamento corrompido” – indica que foi violado pelo usuário. Neste caso deve ser enviado para a **OZONIC** e perde toda e qualquer garantia, pois foi violado.
- “Equipamento descalibrado” – indica que necessita re-calibração. Deve ser enviado para a **OZONIC** para que esta nova aferição seja feita. Ocorre depois de algum desvio no padrão de dosagem.
- “Falha no processo” – indica que algo anormal ocorre na produção do ozônio pelo gerador.
- “contate Assis. Técnica” – faça contato com a OZONIC, de preferência por e-mail alvarez@ozonio.net . Telefone (11) 4330-5033 horário comercial.

ATENÇÃO!

Calibração de Equipamentos, não está coberta por Garantia. Recebido o gerador, será enviado para o laboratório de aferição e calibração. O custo deste serviço é cobrado, incluído o valor SEDEX da remessa postal.

3 – SINAL SONORO CARACTERÍSTICO DE ALTA TENSÃO :

Um ruído agudo significa que o sistema de alta tensão, gerador do ozônio, está operando normalmente. Sua ausência é sinal de anormalidade.

4 – EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE-NOS. Telefone (11) 4330-5033 ou e-mail info@ozonio.net . Não improvise, não permita que pessoas estranhas operem o gerador e de modo algum faça manutenção no mesmo.

Se o gerador **OZONIC** for aberto fora da **OZONIC**, seja qual for a intenção, estará violado e perde toda e qualquer garantia. O visor LCD, pode acusar que o equipamento foi violado e isto destruiu a programação.

JB ALVAREZ – ME – **OZONIC**
CNPJ 07.496.191/0001-73
Inscrição Estadual 626.705.318.119 / SP

Endereço para remessa de equipamentos (manutenção ou calibração), é:
Avenida Indico, 298 – Jardim do Mar – 09750-600 – São Bernardo do Campo – SP sempre via SEDEX.

PROPRIETÁRIO: _____

DATA DE AQUISIÇÃO: ____ / ____ / ____

NOTA FISCAL NÚMERO: _____

**ATENÇÃO! > ESTE PRODUTO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA
NÃO É UM PRODUTO CORRELATO.**